

シンプル

コンパクトでシンプルな MOMO シリーズは気軽に使える暮らしのパートナーです。

存在感のない“黒子デザイン”

福祉用具は主役ではありません。MOMO シリーズはユーザーを支える黒子に徹します。使用中に視界に入らず、“道具を使っている”違和感をほとんど感じません。



腕を乗せるだけ


一度フィッティングしてしまえば、腕を乗せるだけで使い始めることができます。ユーザーはもちろんご家族や介助者にも負担をかけません。



様々な症状の人に

MOMO、MOMO プライムという 2 種類のラインアップにより様々な症状の方が使用できます。仕様の詳細は 6 ページをご覧ください。

疾患別ユーザーの割合（2020 年 7 月末時点）

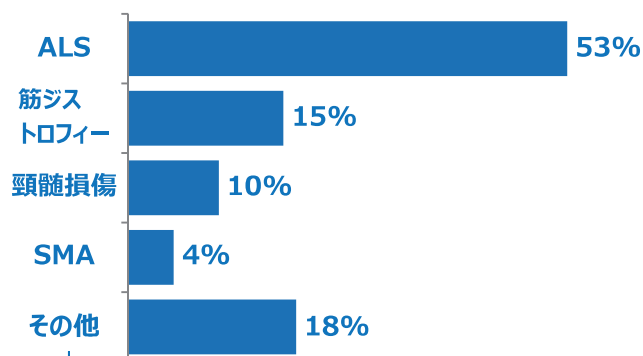

パーキンソン、多発性硬化症、多系統萎縮症、ギランバレー症候群、ミオパチー、リウマチ、ポリオ、脳性麻痺、腕神経叢麻痺、脳挫傷など

ユーザーに合わせた調整

●アシストカの調整



スプリングを選ぶ




スプリングのテンションでアシスト力を調整

暮らしのなかで

やりたいことや暮らしかたは人それぞれ。あらゆる場面で使えるよう、3つの取付用部品を用意しています。

テーブル用ブラケット

表裏が平らなテーブルや台に取り付けることができます。取り付けに必要なスペースは以下のとおりです。

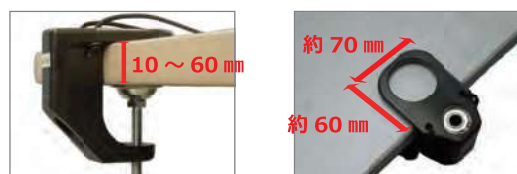

テーブル用ブラケットを選ぶと、MOMO を使わないときに 2 種類の方法で固定することができます。①レストポジションに固定する場合はユーザー自身でつけ外しが可能です。



①レストポジション



②ストラップで固定

スプリングとリンク機構

電気を使わず、1本のスプリングと2～4本のリンクだけで腕の動きをサポートします。安心安全、ランニングコストのかからない福祉用具です。



● バランスの調整



肘を伸ばしやすい調整

肘を曲げやすい調整

フロアスタンド

取付場所に依存せず MOMO を使える自立式のスタンドです。ご自宅の様々な場所、病院などの施設向けにもおススメです。テーブル用ブラケットと同じ方法でレストポジションに固定できます。



サイズ：W 506mm×D 620mm×H 596mm～890mm（調整可能）
重量：約7.3kg

車いす用ブラケット

シート脇または後方のパイプに取り付けることができます。MOMO の取付角度を調整することができます。

車椅子のジョイスティック操作においては必ずご利用者の適正（可否）を見定め、振動や片流れ、接触への対策をしてください。



サイズ：W 72mm×D 162mm×H 73mm
重量：850g
取付に必要なパイプ長：52mm
取付可能パイプ径：Φ16mm - Φ27.2mm

MOMO と MOMO プライム

MOMO



MOMOプライム



サポート方法

スプリングの張力と腕の重さが釣り合った高さで腕を支えてくれます。
水平方向の動作や肘の屈曲による上方向へのリーチをサポートします。



上方へのリーチ：肘の屈曲

やりやすくなる動作

肩：内旋・外旋
肘：屈曲・伸展

常に一定の力で腕を持ち上げようとしてくれます。
水平方向に加え、肩の筋力を使った肘を上げる動作もサポートします。



上方へのリーチ：肩の外転がメイン



上方へのリーチ：肩の屈曲 + 肘の屈曲

やりやすくなる動作

肩：内旋・外旋、内転・外転、屈曲・伸展
肘：屈曲・伸展

ユーザー層

※一般的な例です。両タイプを試したうえで、適切なものをお選びください。

- ・肩回りの機能が非常に弱い方／低下が見込まれる方
- ・神経疾患、筋疾患の患者の方

- ・多少の支えがあれば自力で肘の高さを保てる方
- ・上肢の機能回復が見込まれる方
- ・頸髄損傷（C4～C6レベル）の方
- ・神経疾患、筋疾患の患者の方

サポート可能重量（腕の重さの目安）

5.0kg まで

サポート力

弱：0.5 - 1.4kg 中：0.7 ～ 1.7kg 強：1.1 ～ 2.7kg

サポートの有効範囲（高さ方向・目安）

肘の屈曲により上方向へのリーチをサポート

約 200mm

水平方向の動作範囲（目安）

2リンク：約 200mm

3リンク：約 300mm

4リンク：約 400mm

重量

約 1.7Kg

約2.0Kg

取付場所

※取り付けに関する詳細は4～5ページをご確認ください。

テーブル（テーブル用ブラケット）

車椅子（車いす用ブラケット）

専用スタンド（フロアスタンド）

組み合わせ・価格

ユーザーの状態に合わせ部品を組み合わせ使用します。 特約店等からデモ機を借りてお試しのうえ、適切な組み合わせでご注文ください。

補装具として購入する場合は、**非課税になり、価格の算出方法も異なります**。 特約店等へ見積りをご依頼ください。

病院・施設
等のお客様へ 不特定多数の利用者が想定されるお客様向けに、必要部品をセットにして提供しています。
詳細は特約店またはテクノツールへお問い合わせください。

[記載方法] 部品名 標準価格(税込み) / 型番

本体を選ぶ

違いを確認
↓
6ページ



左右に関わらず同じ本体を使用することができます。

※左右を入れ替えるときは同梱の六角レンチを使用します。

① MOMO本体	176,990 円 / S20000A01
② MOMOプライム本体	216,920 円 / S30000A01

スプリングを選ぶ

違いを確認
↓
6ページ



③ MOMO用スプリング 弱	15,620 円 / S21009A01
④ MOMO用スプリング 強	15,620 円 / S21010A01
⑤ MOMOプライム用スプリング 弱	15,620 円 / S31005A01
⑥ MOMOプライム用スプリング 中	15,620 円 / S31006A01
⑦ MOMOプライム用スプリング 強	15,620 円 / S31007A01

アームレストを選ぶ



⑧ アームレストタイプA 右用	81,180 円 / S22000A01
⑨ アームレストタイプA 左用	81,180 円 / S22000A02
⑩ アームレストタイプB 右用	81,180 円 / S22100A01
⑪ アームレストタイプB 左用	81,180 円 / S22100A02
⑫ アームレストタイプC 右用	81,180 円 / S22200A01
⑬ アームレストタイプC 左用	81,180 円 / S22200A02


取付部品を選ぶ

違いを確認
↓
5ページ



⑭ テーブル用ブラケット	58,080 円 / S23000A01
⑮ フロアスタンド	129,030 円 / S71000A01
⑯ 車いす用ブラケット右用	117,040 円 / S73000A01
⑰ 車いす用ブラケット左用	117,040 円 / S73000A02

リンク数を選ぶ

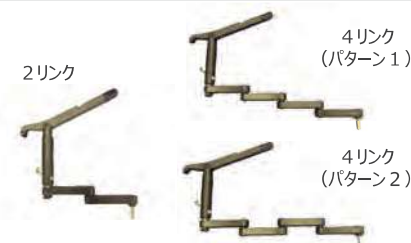

本体は3リンクで構成されており、2リンクに組み換えることができます。
4リンクで使いたい場合は**水平リンクを追加購入**してください。
リンク数は取付位置との距離、動作範囲等を考慮してお選びください。

⑱ 水平リンク	17,160 円 / S21005A01
---------	----------------------

組み合わせ例・片腕

MOMO / スプリング 弱 / 右腕 / テーブル用ブラケット

①+③+⑧+⑭ 331,870 円 (税込み)

プライム / スプリング 強 / 左腕 / フロアスタンド

②+⑦+⑨+⑮ 442,750 円 (税込み)

組み合わせ例・両腕

MOMO ×2 / スプリング 強 ×2 / 水平リンク追加 ×2 / 左右 / 車いす用ブラケット ×2 (①+④+⑱)×2+⑧+⑨+⑯+⑰ 815,980 円 (税込み)